

Kompresivní punčochové zboží 2011



Vážení zákazníci,

od okamžiku, kdy naše česká rodinná firma Aries upletla svou první punčochu, uplynulo dvacet let. Během této doby jsme se vždy snažili navrhnout pro Vás kvalitní zboží, vybrat ty nejlepší materiály, pečlivě je zpracovat a přidat k nim ještě něco navíc. Antimikrobiální stříbro, mikrokapsle, mikrovláknno nebo třeba ovíjenou Lycru.

Naše zkušenosti a náš přístup jsme zúročili i v sortimentu podpůrného a zdravotního kompresivního zboží. Záleží nám totiž na tom, abyste své punčochy opravdu nosili a cítili se v nich dobře.



Ladislav Šulc
Majitel a ředitel
společnosti Aries, a.s.

Křečové žíly a kompresivní terapie

Křečové žíly jsou problémem, který ve vyspělých evropských zemích postihuje 40 % žen a 20 % mužů.


Onemocnění žilního systému je dlouhodobou nemocí, jež vyžaduje úpravu životního stylu a téměř stálou léčbu. Základem této léčby je kompresivní terapie.

Křečové žíly (varixy) vznikají na základě dědičnosti, dalšími faktory jsou statická zátěž, sedavé zaměstnání, stáří, nedostatek pohybu, obezita nebo gravidita. Kromě těchto faktorů se na poškození žilních chlopní často podílí také zánět.

V důsledku poruchy funkce žilního systému se objevují známky chronické žilní nedostatečnosti, například křečové žíly, otoky dolních končetin, hemosiderinová pigmentace, žilní bérkové vředy a další.

Kompresivní punčochové zboží

Princip ochrany žil pomocí punčochového zboží spočívá v tom, že v oblasti kotníku je vytvořen určitý tlak, který se směrem k pasu postupně snižuje. Je ověřeno, že takové přidržování žilních stěn v dolních částech nohou účinně zlepšuje krevní oběh a podporuje návrat krve k srdci. Nohy Vás potom díky kompresivním punčochám nebolí a Vy se cítíte lépe a v dobré kondici.

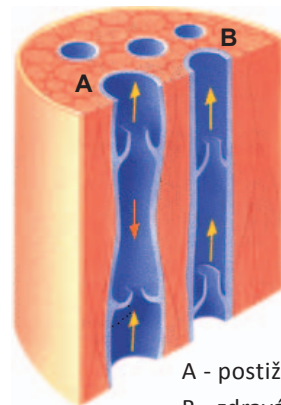

A - postižená žíla
B - zdravá žíla

Sedm rad pro prevenci křečových žil

Tak jako u řady jiných onemocnění, i v případě prevence křečových žil hraje důležitou úlohu Váš životní styl. Nabízíme Vám několik jednoduchých rad, jak pro své zdraví něco udělat.

1 Pohyb: Chodte na procházky, běhejte, jezděte na kole nebo si zaplavte. Pohyb podporuje činnost svalové pumpy Vašich dolních končetin a tím i krevní oběh.

2 Jídelníček: Dbejte na dostatečný přísun vitamínů C a E, vlákniny, vápníku, hořčíku a zinku.

3 Nohy na stole: Najděte si přes den pár chvil a posaďte se s nohama ve zvýšené poloze. Podpořte tak krevní oběh v dolních končetinách.

4 Nebraňte cirkulaci krve: Vyvarujte se dlouhého stání nebo sezení, dávání nohy přes nohu, nošení příliš těsných kalhot nebo vysokých podpatků.

5 Studená sprcha: Dopřejte svým nohám studenou sprchu nebo studené obklady.

6 Zacvičte si: Zkuste kroužit kotníky oběma směry, propínat a krčit prsty nohou a celé nártý, přitahovat pokrčené nohy k hrudníku a následně je propínat nebo v lehu na zádech šlapat jako na kole. Některá z těchto cvičení můžete dělat i v kanceláři nebo čekárně.

7 Podpůrné punčochy: Noste podpůrné punčochy nebo podkolenky. Kvalitní podpůrné zboží dnes již na první pohled nerozeznáte od běžných punčoch a nabídka je široká. Vždy se však ujistěte, že Vámi zvolený model má lemy nebo krajky, které neškrtí, nezpůsobují otoky a nebrání cirkulaci krve.

Žilní poradna

Trápí Vás bolení nohou, otoky nebo křečové žíly? Potřebujete poradit s léčbou nebo prevencí? Chtěli byste se zeptat špičkového odborníka?

Navštivte naši Žilní poradnu na webových stránkách www.zilni-poradna.cz. O problémech zde srozumitelně píší a na Vaše přímé dotazy nestranně odpovídají lékaři, kteří jsou ve svém oboru uznávanými autoritami.





Materiály a kvalita

Na kvalitu dbáme od samého začátku. Proto pro Vás navrhujeme kvalitní zboží, vybíráme ty nejlepší materiály, pečlivě je zpracováváme a snažíme se přidat ještě něco navíc.

Nylon je základem punčochy. Ve výrobcích Avicenum proto používáme pouze značkovou polyamidovou přízi PAD 6.6 od předních výrobců ze Švýcarska, Itálie a Francie.

Lycra® se stala synonymem pro elestan. V punčochách Avicenum pomocí ní vytváříme požadovanou kompresi. Lycra® je garantem kvalitního, funkčního a trvanlivého výrobku.


Certifikáty nezávislých institucí doplňují náš přísný interní systém kvality. Například při vývoji punčoch Avicenum 360 na naše vlastní náročné testování vždy navazují certifikace v renomovaném německém institutu Hohenstein a klinická hodnocení na prestižních institutech a klinikách v České republice.

Mikrovlákno

Mikrovlákno je příze spředená z vysokého počtu tenoučkých filament (kapilár). Deset kilometrů jedné takové filamenty neváží ani celý gram.

Výrobky z mikrovlákna jsou velice příjemné na omak, pohodlně se nosí, lépe sají a odvádějí pot, mají moderní sametový nádech a vyznačují se delší trvanlivostí.

To vše jsou důvody, proč mikrovlákno používáme ve všech našich punčochách druhé kompresní třídy. Tedy i tam, kde je často považováno za nadstandard.

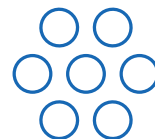


Mikrovlákno

Ovíjená Lycra®

Holé vlákno elastanu může **dráždit** citlivou pokožku. Proto jej ovíjíme **ochranným vláknem**. Dokonce dvojitě. Ovinutí zabraňuje přímému styku elastanu s pokožkou a zvyšuje komfort nošení. Při každodenním používání rozdíl poznáte.

Nešetříme a dvojitě ovinutou Lycru používáme ve všech výrobcích Avicenum. Proto se vnitřek našich punčoch neleskne. A proto se naše punčochy dobře nosí.

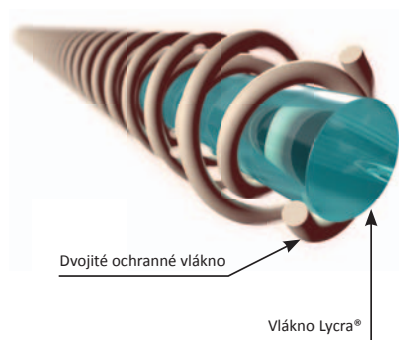

Lemy a krajky




Naše lemy a krajky nejsou jen estetickým zakončením punčochy. Důsledně dbáme na jejich funkčnost a pohodlnost, neustále je zdokonalujeme a pečlivě testujeme.

Naše **krajka** obsahuje příčně vložené **lamely**, které zamezují jejímu nepříjemnému shrnování. Důkladně jsme přemýšleli také nad umístěním silikonu. Díky tomu punčocha dobře **drží na noze** a pokožka se nadbytečně nepotí.

Lem je optimální volbou pro pacienty s velice citlivou pokožkou. V novém roce se můžeme pochlubit **nejširším lemem na trhu**. Ten dokonale drží, ale na noze jej téměř nepocítíte.

Barvy zboží Avicenum

Tělové barvy

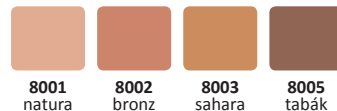

Kouřové barvy



Co je to DEN?

Denier (DEN) vyjadřuje sílu použitého textilního vlákna. Čím je číslo vyšší, tím silnější (méně průhledný) je výrobek.

Fyzikálně je denier definován jako délková hmotnost vlákna. Označuje, kolik gramů váží devět kilometrů použité příze.


Mikrokapsle Skintex®: Proti pocitu těžkých nohou („bylinky“)

Mikrokapsle jsou drobné chitosanové skořápky vyráběné z výtažků ze schránek mořských garnátů. Uvnitř v sobě nesou pečlivě vybrané účinné látky.

Ve zboží Avicenum fixujeme kapsle přímo **na povrchu** textilních vláken, kde dochází ke kontaktu s pokožkou a kde je jejich působení nejúčinnější. Díky pevné vazbě kapsle odolají i opakovanému praní. Během nošení punčoch však postupně praskají a **uvolňují účinné látky**. Dlouhodobě tak pečují o zdraví a dobrou kondici nohou. Rozdíl je skutečně znatelný. Od prvního okamžiku.



Mikrokapsle Skintex® na textilních vláknech

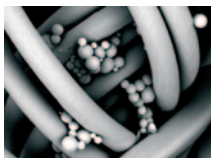

Značkové německé **mikrokapsle Skintex® AHL** (Anti-Heavy-Legs) pomáhají předcházet pocitu těžkých nohou, vyživují a hydratují pokožku a díky obsahu mentolu též chladí a osvěžují. Říkáme jim též „bylinky“.

Grapefruit pomáhá obnově kožních buněk.

Citron dodává svěžest a vitalitu.

Mentol osvěží a zchladí.

Tymián jemně dezinfikuje pokožku.

Cypřiš podporuje krevní oběh a omezuje nadměrné pocení.

Urea hydratuje pokožku a má antimikrobiální účinky.



Sanitized® Silver: Švýcarské antimikrobiální stříbro



Sanitized® Silver je špičková **antimikrobiální úprava** od renomované švýcarské společnosti Sanitized®.


Vyniká svou stálostí, naprostou nezávadností a vysokou účinností. Pracuje na **bázi iontů stříbra** a neobsahuje potenciálně problematické nanostříbro.

Úprava Sanitized® Silver je ve výrobcích Avicenum aplikována přímo na povrchu textilních vláken, tedy tam, kde dochází k množení bakterií a plísní. Stříbro spolehlivě účinkuje proti širokému spektru mikroorganismů. Ionty pronikají jejich buněčnou stěnou a zamezí přísunu kyslíku a živin. Spolehlivě tak zabrání dalšímu množení a vzniku kolonií, které jsou často rezistentní i vůči běžnému pracímu cyklu.

Působení stříbra na bakterie



Ve vlhkém prostředí ionty stříbra lokalizují a deaktivují bakterie

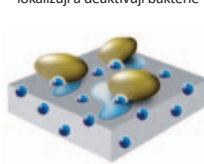

Stříbro díky tomu působí jako **deodorant**, zabraňuje vzniku nepříjemných pachů a zpřijemňuje každodenní nošení punčoch. Současně chrání textilní vlákna před poškozením a zvyšuje trvanlivost výrobku.

Úprava Sanitized® Silver je vysoce stálá, zcela bezpečná pro lidský organismus i životní prostředí a byla úspěšně dermatologicky testována.

Společnost Aries **garantuje**, že ve výrobcích Avicenum nepoužívá nanostříbro.

Neupravené vlákno



Upravené vlákno



DeoSoft: Dotek hebkosti




DeoSoft je nová úprava, kterou jsme pro Vás objevili ve Švýcarsku.

Díky DeoSoftu jsou naše punčochy ještě **měkčí a hebké**. Přípravek současně zvyšuje savost textilních vláken, která nyní lépe **odvádějí pot a vlhkost** od těla. Výsledkem je větší pohodlí při nošení punčoch.

Úpravu DeoSoft nově aplikujeme na všechny výrobky Avicenum 360 s mikrokapslemi AHL. Efekt je stálý a odolává praní.

DeoSoft zajišťuje lepší odvádění potu a vlhkosti od těla.

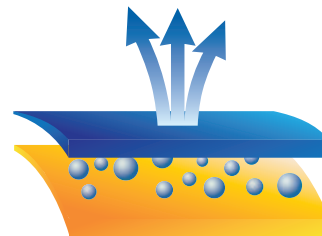

Avicenum 70

**Kompresní třída A
(10-14 mmHg)**

Podpůrné punčochové zboží Avicenum 70 zlepšuje krevní oběh, je účinnou prevencí proti tvorbě křečových žil, zabraňuje vzniku občasných otoků a zmírňuje pocity bolesti a únavy nohou.

Při každodenním nošení oceníte také švýcarské antimikrobiální stříbro Sanitized® Silver.

76 % Nylon, 24 % Lycra



Ovijená Lycra®



Antimikrobiální
stříbro



Mikrokapsle
Skintex® AHL




Zesílená pata

Podpůrné cestovní podkolenky Travel se zesílenou patou a mikrokapslemi Skintex® AHL


Velikosti:	23-25	25-27	27-29
	29-31		
Barvy:	8002	9999	
	0000 – pouze u velikosti 25-27		
	7007 – není u velikosti 29-31		
Balení:	1 pár v krabičce		
	20 krabiček v kartonku		



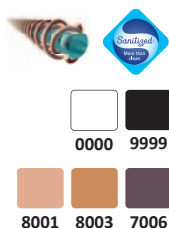

Podpůrné podkolenky

Velikosti: 23-25 25-27 27-29
 Barvy: 8001 8003 7006 9999
 0000 – pouze u velikostí 23-25 a 25-27
 Balení: 1 pár v krabičce
 30 krabiček v kartonku

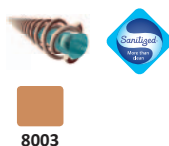


Podpůrné punčochy na podvazek

Velikosti: 25 27
 Barvy: 8003
 Balení: 1 pár v krabičce
 15 krabiček v kartonku




Podpůrné samodržící punčochy s krajkou

Velikosti: 25 27
 (obvod stehna 50-60 cm)
 Barvy: 8001 8003 7006 9999
 Velikosti: 27-29
 (obvod stehna nad 60 cm)
 Barvy: 8001 9999
 Balení: 1 pár v krabičce
 10 krabiček v kartonku

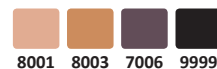

Podpůrné těhotenské punčochové kalhoty

Velký přední klín: 164-170/124-132
 170-176/124-132
 176-182/124-132
 Barvy: 8001 9999
 Balení: 1 kus v krabičce
 10 krabiček v kartonku

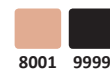



Podpůrné punčochové kalhoty

Malý klínek: 158-164/100
164-170/108
170-176/108-116
176-182/108-116

Velký klín: 158-164/116-124
164-170/116-124
170-176/116-124
176-182/116-124

Barvy: 8001 8003 9999
8005 – není u velikostí:
MK 170-176/108-116
VK 176-182/116-124
7007 – není u velikostí:
VK 176-182/116-124

Balení: MK: 15 krabiček v kartonku
VK: 10 krabiček v kartonku



8001 8003 8005 7007 9999



Zesílená pata

Podpůrné punčochové kalhoty se zesílenou patou

Malý klínek: 158-164/100 164-170/108
170-176/108-116 176-182/108-116

Velký klín: 158-164/116-124 164-170/116-124
170-176/116-124 176-182/116-124

Barvy: 8001 8003 9999

Balení: 1 kus v krabičce
15 krabiček v kartonku



8001 8003 9999


GOLDWEAR *support*

**Kompresní třída A
(10-14 mmHg)**

Pánské podpůrné punčochové kalhoty Goldwear zlepšují krevní oběh, jsou účinnou **prevencí** proti tvorbě křečových žil, zabráňují vzniku občasných otoků a zmírňují pocity bolesti a únavy nohou.

Při každodenním nošení oceníte také švýcarské antimikrobiální **stříbro** Sanitized® Silver.

76 % Nylon, 24 % Lycra

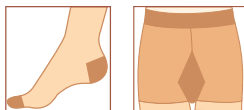

Ovijená Lycra®



Antimikrobiální
stříbro



Pánské podpůrné punčochové kalhoty se zesílenou patou

Velikosti: 170/80 (S)
176/88 (M)
182/96 (L)
188/102 (XL)
194/108 (XXL)

Barvy: 8003 9999
Balení: 1 kus v krabičce
10 krabiček v kartonku



8003 9999

Velikosti výrobků Avicenum 70 a Goldwear Support

Správnou velikost zboží Avicenum 70 a Goldwear Support stanovíte velice snadno. U podkolenek a stehenních punčoch používáme standardní konfekční velikosti. U punčochových kalhot uvádí první číslo v označení velikosti výšku postavy, druhé číslo obvod boků (u pánských modelů obvod pasu). Obě míry jsou udávány v centimetrech.

Víte, že...

v podpůrných punčochách od firmy Aries létají letušky českých leteckých dopravců?

Avicenum 140

**Kompresní třída I
(15-21 mmHg)**

Zdravotní punčochové zboží první kompresní třídy **zmírňuje projevy** počínající žilní nedostatečnosti a pocity únavy a napětí v nohou.

Mikrokapsle Skintex® AHL fixované v úpletu vyživují a hydratují Vaši pokožku a působí proti pocitu těžkých nohou. Trvanlivost výrobku výrazně prodlužuje zesílená pata.

64 % Nylon, 36 % Lycra



Mikrovlákno



Ovijená Lycra®



Mikrokapsle
Skintex® AHL



8001 9999

Podpůrné lýtkové punčochy JEMNÉ s mikrokapslemi Skintex® AHL

Velikosti: 1K 1D 2K 2D 3K 3D
Barvy: 8001 9999
Balení: 1 pár v krabičce
20 krabiček v kartonku



8001 9999

Podpůrné lýtkové punčochy SILNÉ s mikrokapslemi Skintex® AHL

Velikosti: 1K 1D 2K 2D 3K 3D
Barvy: 8001 9999
Balení: 1 pár v krabičce
20 krabiček v kartonku



Podpůrné stehenní samodržící punčochy s mikrokapslemi Skintex® AHL

Velikosti: 1K 1D 2K 2D 3K 3D
 Barvy: 8001 9999
 Balení: 1 pár v krabičce
 10 krabiček v kartonku



Podpůrné punčochové kalhoty s mikrokapslemi Skintex® AHL

Malý klínek: 1K 1D
 Velký klín: 2K 2D
 Předozadní klín: 3K 3D
 Barvy: 8001 9999
 Balení: 1 kus v krabičce
 10 krabiček v kartonku

Velikosti výrobků Avicenum 140

Pro určení správné velikosti výrobků Avicenum 140, prosím, postupujte podle níže uvedené tabulky a obrázku.

Měření provádějte nejlépe po ránu. Změřte na noze všech šest bodů, které vyžaduje tabulka velikostí. Umístění na noze ilustruje obrázek.

Měřený obvod v bodě	Velikost		
	1	2	3
t ... obvod pasu	80	90	100
h ... obvod boků	110	120	130
g ... obvod stehna (5 cm pod rozkrokem)	50 – 55	55 – 60	60 – 66
f ... obvod stehna (ve středu stehna)	46 – 50	50 – 54	54 – 58
d ... obvod pod kolenem	34 – 37	37 – 40	40 – 44
b ... obvod nad kotníkem	22 – 24	24 – 27	27 – 30

Výška nohy mezi body A-G u punčochových kalhot

a stehenních punčoch:


do 70 cm ... varianta K

nad 70 cm ... varianta D

Výška nohy mezi body A-D u lýtkových punčoch:

do 37 cm ... varianta K

nad 37 cm ... varianta D

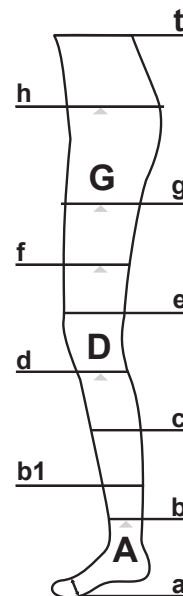


- a obvod chodidla
- b obvod nad kotníkem
- b1 obvod 10 cm nad kotníkem
- c obvod lýtky
- d obvod pod kolenem
- e obvod nad kolenem
- f obvod stehna
(ve středu stehna)
- g obvod stehna
(5 cm pod rozkrokem)
- h obvod boků
- t obvod pasu

Avicenum 360

Kompresní třída II (23-32 mmHg)

Zdravotní punčochy druhé kompresní třídy podporují správnou funkci žilních chlopní, stabilizují krevní oběh a jsou nenahraditelnou součástí **kompresivní terapie**. Jejich správná funkce je ověřována a certifikována prestižním německým institutem Hohenstein.

60 % Nylon, 40 % Lycra

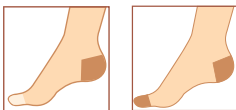

Mikroválkno



Ovižená Lycra®



DeoSoft



Antimikrobiální
stříbro



Mikrokapsle
Skintex® AHL



Zdravotní lýtkové punčochy s antimikrobiálním stříbrem Sanitized® Silver

Velikosti: 1 2 3 4
(K – krátká, D – dlouhá)
Provedení: se špicí / bez špice
Barvy: 8001 9999
Balení: 1 pár v krabičce
Kód VZP: 0045774



Zdravotní lýtkové punčochy s mikrokapslemi Skintex® AHL

Velikosti: 1 2 3 4
(K – krátká, D – dlouhá)
Provedení: bez špice
Barvy: 8001
Balení: 1 pár v krabičce
Kód VZP: 0045773



Zdravotní stehenní samodržcí punčochy s krajkou s antimikrobiál- ním stříbrem Sanitized® Silver

Velikosti: 1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+
(K – krátká, D – dlouhá)
Provedení: se špicí / bez špice
Barvy: 8001 9999
Balení: 1 pár v krabičce
Kód VZP: 0045776



Zdravotní stehenní samodržcí punčochy s krajkou s mikrokapslemi Skintex® AHL

Velikosti: 1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+
(K – krátká, D – dlouhá)
Provedení: bez špice
Barvy: 8001
Balení: 1 pár v krabičce
Kód VZP: 0045775




Zdravotní stehenní punčochy s lemem s antimikrobiálním stříbrem Sanitized® Silver

Velikosti: 1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+
(K – krátká, D – dlouhá)
Provedení: se špicí / bez špice
Barvy: 8001 9999
Balení: 1 pár v krabičce
Kód VZP: 0045786



Zdravotní punčochové kalhoty s antimikrob. stříbrem Sanitized® Silver

Malý klínek: 1 2
Velký klín: 3 4
(K – krátká, D – dlouhá)
Provedení: se špicí
Barvy: 8001 9999
Balení: 1 kus v krabičce
Kód VZP: 0192090

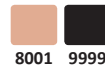

Avicenum 360

Cotton

Kompresní třída II (23-32 mmHg)

Zdravotní punčochy druhé kompresní třídy s **vyšším podílem bavlny (60 %)** jsou vhodné zejména pro pacienty s citlivou pokožkou. Bavlna je doplněna příjemným **mikrovláknem** a dvojitě ovíjenou Lycrou®.

Punčochy Avicenum 360 Cotton podporují správnou funkci žilních chlopní, stabilizují krevní oběh a jsou určeny **pro kompresivní terapii**. Jejich výroba probíhá podle přísné normy RAL a správná funkce je ověřována a certifikována prestižním německým institutem Hohenstein.

60 % Cotton (bavlna), 35 % Lycra, 5 % Nylon


Kompresivní
terapie



Mikrokapsle
Skintex® AHL



Mikrovlákno

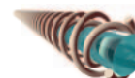

Ovíjená Lycra®



Bavlna



DeoSoft

Zdravotní lýtkové punčochy s bavlnou a mikrokapslemi Skintex® AHL

Velikosti: 1 2 3 4
(K – krátká, D – dlouhá)

Provedení: bez špice

Barvy: 8001

Balení: 1 pár v krabici

Kód VZP: 0161106



8001

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s krajkou s bavlnou a mikrokapslemi Skintex® AHL

Velikost: 1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+
(K – krátká, D – dlouhá)

Provedení: bez špice

Barvy: 8001

Balení: 1 pár v krabici

Kód VZP: 0161108



8001


Velikosti výrobků Avicenum 360

Při určování velikosti, prosím, věnujte pozornost měření. Závisí na něm správná funkce punčochy.

Měření provádějte po ránu. V průběhu dne noha natéká. Změřte všechny body, které vyžaduje tabulka velikostí. Umístění na noze ilustruje obrázek.

Při volbě velikosti jsou nejdůležitější hodnoty, které mají v tabulce šedé pozadí. Ujistěte se, že zde bude punčocha dokonale sedět.

Nesnažte se ulevovat sobě nebo pacientovi volbou větší punčochy než je třeba. Taková punčocha nepomůže.

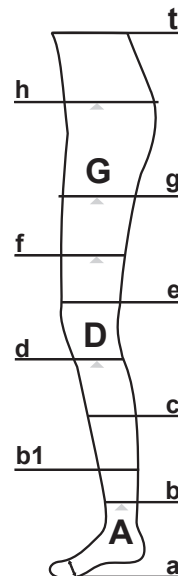

- a obvod chodidla
- b obvod nad kotníkem
- b1 obvod 10 cm nad kotníkem
- c obvod lýtky
- d obvod pod kolenem
- e obvod nad kolenem
- f obvod stehna (ve středu stehna)
- g obvod stehna (5 cm pod rozkrokem)
- h obvod boků
- t obvod pasu

	Krátká (K)	Dlouhá (D)
Délka A – D	34 – 38	39 – 43
Délka A – G	62 – 71	71 – 82

Velikost	Obvod nohy v měřených bodech									
	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
1	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	40 – 48	47 – 57	110	80
1+	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	48 – 56	57 – 67		
2	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
2+	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72		
3	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67		
3+	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
4	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72		
4+	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82		

Avicenum ANTI-TROMBO

Proti trombóze (13-18 mmHg)

Antitrombotické punčochy jsou určeny **pro ležící pacienty**, u kterých snižují riziko vzniku krevních sraženin. Punčochy jsou ošetřeny švýcarským antimikrobiálním **stříbrem** Sanitized® Silver.

70 % Nylon, 30 % Lycra



Mikrovlákno



Ovijená Lycra®



Antimikrobiální
stříbro

Antitrombotické zdravotní lýtkové punčochy

Velikosti: S M L XL XXL

Barvy: 0000

Balení: 1 pár v sáčku



0000



Antitrombotické zdravotní stehenní punčochy

Velikosti: S M L XL XXL

Barvy: 0000

Balení: 1 pár v sáčku




0000



Velikosti výrobků Avicenum Anti-Trombo

Velikost	Měřený obvod v bodě		
	b	d	g
S	17 – 20	28 – 34	41 – 54
M	20 – 23	31 – 37	48 – 61
L	23 – 26	34 – 40	55 – 68
XL	26 – 29	37 – 43	62 – 75
XXL	29 – 32	40 – 46	69 – 82

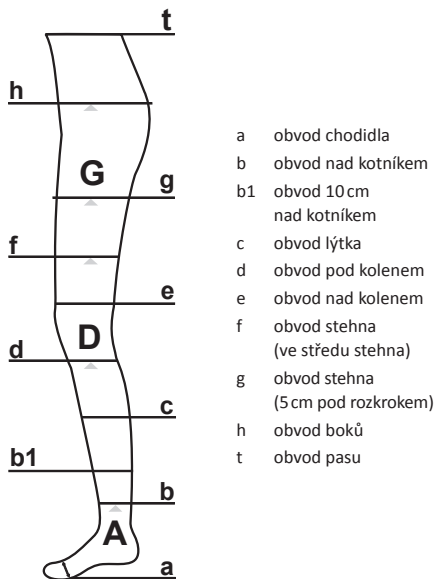

Avicenum GEL

Chladivý gel na nohy s koňským kaštanem a koenzymem Q10

Chladivý gel na nohy s koňským kaštanem a koenzymem Q10 je kombinací rostlinných výtažků, které příznivě působí na namáhané nohy a svaly a napomáhají při prevenci a léčbě křečových žil.

- Udržuje pokožku zdravou a pružnou
- Posiluje cévní stěny a pomáhá odstraňovat otoky
- Podporuje krevní oběh

Koenzym Q10 omlazuje pokožku a podporuje její regeneraci.

Koňský kaštan příznivě působí na stav cévních stěn a pomáhá odstraňovat otoky.

Borůvky obsahují antioxidanty, které zlepšují proudění krve v žilách a kapilárách.

Výtažek z rostliny **gotu kola** podporuje krevní oběh a zvyšuje pružnost pokožky.

Proces **mikronizace**, využitý při přípravě gelu, zajišťuje lehké rozstírání, snadné vstřebávání aktivních látek a maximální účinek užití.

Gel byl testován a certifikován Státním zdravotním ústavem v Praze.



Avicenum Gel

Balení: tuba, 75 ml



ARIES, a.s.

512 33 Studenec u Horek 309

Objednávky:

Expediční středisko Studenec
Po – Pá 6:00 – 17:00

Ing. Jana Vanclová

Zelená linka: 800 112 595

Fax: 800 113 595

Mobil: 605 711 777

602 453 003

E-mail: expedice@aries.eu

Oddělení péče o zákazníka:

Iva Šulcová

Zelená linka: 800 111 595

Telefon: 481 595 111

Fax: 481 595 481

E-mail: aries@aries.eu

Medicínští reprezentanti:

Praha	Lenka Formanová	605 299 502
Brno	Dita Divácká	605 299 519
Plzeň	Eva Polášková	605 299 508
Hr. Králové	Klára Mikšovská	605 299 516

Obchodní zástupci:

Studenec	Adam Bartoň	605 299 501
Praha	Lenka Formanová	605 299 502
Brno	Pavel Utíkal	605 299 503
Ostrava	Miroslav Pavelec	605 299 504
Plzeň	Libuše Rozumová	605 299 505